

Vivago-hälsoarmband

Om du känner att du behöver hjälp, tryck genast på armbandets tryckknapp under ca 3 sekunder tills armbandets röda ljus blinkar till.

Hemsystemet består av

- Ett armband, som du hela tiden bör bära runt handleden. Ta inte av det ens när du går i säng eller går ut. Obs. Larmen från armbandets förmedlas vidare endast när användaren befinner sig inom basenhetens räckvidd, som är ca 20 meter. Tryckknappen fungerar oberoende om armbandets sitter runt handleden eller ej.
- Bär inte armbandets på samma arm som en klocka eller en armbågsstyrelse, eftersom de kan förorsaka störningar. Ha inte heller stoppningar eller något annat material mellan handleden och armbandets.
- Armbandets tål stänkavatten, men det får varken sänkas i vatten eller utsättas för vattenstråle. Kemikalier och tvättmedel kan skada det. Du behöver inte ta av dig armbandets till exempel då du tvättar händerna eller diskar, men se till att du inte väter armbandets. Ta av dig armbandets när du duschar eller tar ett bad. Armbandets får inte heller användas i bastun eller när man simmar.
- Om du av någon anledning glömmet att sätta på armbandets igen, sänder systemet automatiskt ett meddelande till larmmottagaren två timmar efter att armbandets har tagits av.
- En basenhet, som kontinuerligt tar emot information från armbandets. Basenheten granskar larmen och skickar dem via telefonnätet till larmmottagaren. Efter detta kan mottagaren prata med dig.
- Basenheten måste kopplas till el- och telefonuttaget. Om det uppstår ett strömavbrott, slocknar basenhetens signalljus och den piper till tre gånger. Systemet sänder ett "Multilink nätströmsavbrott" när strömmen har varit borta längre än 60 minuter i ett sträck. Basenhetens reservbatteri möjliggör 8 timmars funktionstid då strömmen är borta.

